

ケアメディックス

介護用品総合カタログ

VOL.7

- ケアスロープ[®]
- ケアスロープ[®]J
- ケアスロープ[®]JC
- ケアスロープ[®]T
- デクパック
- 車いすシートカバーシリーズ
- 高機能防水シートシリーズ
- 高機能サポーターシリーズ
- お風呂ピタットシート
- ライトスライド
- Bio-TC[®]シリーズ

Caremedics



車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品

安心と使いやすさにスマートさをプラス


ケアスロープ®

最大耐荷重
300kg



◆今まで入らなかった狭い間口に対応できる豊富なラインナップ!

《日本製》特許第5549894号 取得

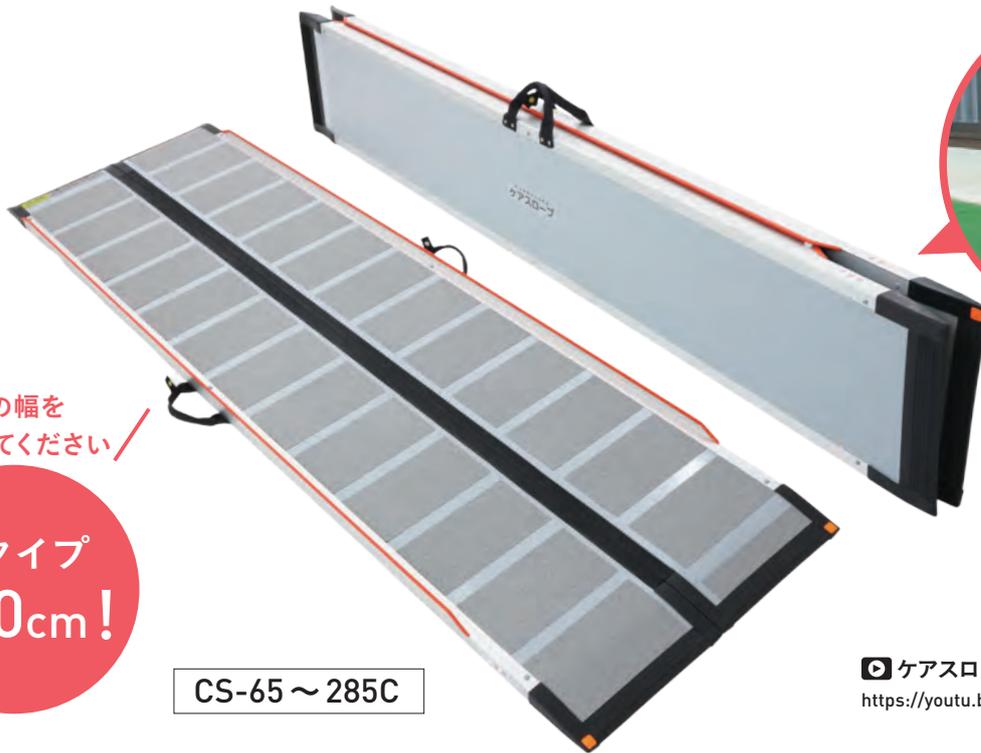

この幅を活かしてください

全タイプ
幅70cm!

CS-65 ~ 285C

📺 ケアスロープ紹介動画
<https://youtu.be/UTt9hjDjRVw>



特長

● 狭い間口にも対応
幅を70cmにすることで、従来入らなかった狭い間口にも対応!



● メンテナンス性の向上
ご利用者、お取り扱い業者の目線に立ち、簡単・時短・低コストで自社メンテナンスができるようにしました。
※詳しくは4ページ参照

● 最小回転半径で乗り入れ可能
下端部の脱輪防止エッジをカットすることで車いすのフットサポートがエッジに当たることなく、最小回転半径で乗り入れが可能です。



● 屋内でも使えるスロープ
走行面にやわらかい材質のすべり止めを採用。

CS-285C



3つのハンドバンドで取り回しが楽々!

ハンドバンドを3カ所に配置し、ひとりでも両手で持つことができ、取り回し易く、二人でも運搬・設置が可能です。



幅70cm、メンテナンス性の良さをそのままに、より高段差に対応できます。



使用方法




1 上端側を設置場所に置いてください



2 ハンドバンドのボタンを外してください



3 ハンドバンドを持ち、パネルを広げてください

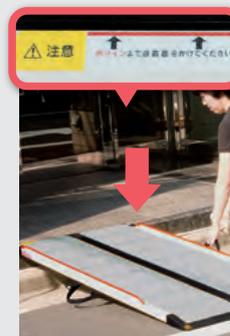

4 パネルの設置面を上端側に表示している「設置ライン」までかけてください

ケアスロープ対応段差の目安表

注意 段差にあったスロープでも、道路にはみ出すと危険です。

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大対応段差
※ 車いすの種類や介助する方の体力等により、対応範囲は変化します。この表は目安としてお使いください。 ※ 段差に対し最低でも6倍以上の長さのスロープをお使いください。	 5°	 8°	 10°	 15°
CSタイプ	介助者なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
CS-65	5cm	9cm	11cm	15cm
CS-100	8cm	13cm	17cm	24cm
CS-120	10cm	16cm	20cm	30cm
CS-150	13cm	20cm	25cm	37cm
CS-175	15cm	24cm	30cm	43cm
CS-200	17cm	27cm	34cm	50cm
CS-240C	20cm	33cm	41cm	60cm
CS-285C	24cm	39cm	49cm	73cm


☆全タイプJIS認証、貸与マーク取得済。

折りたたみ・自立



全タイプ折りたたんだ時に自立するので、無理な体勢からの持ち上げが不要です。

簡単なメンテナンス 簡単・時短・低コストで補修が可能です。

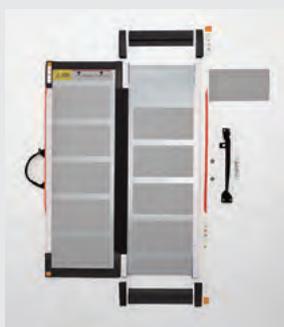

ケアスロープは、メンテナンスが簡単・時短・低コスト!

メンテナンス部材を各パーツ取揃えてありますので、お客様ご自身で補修することが可能です。

補修の方法はこちらをチェック!

📺 ケアスロープメンテナンス動画
<https://youtu.be/Ur-v7Bw7h10>



ハンドバンドの交換は、ビス留め式。ドライバーで交換できます。



すべり止めテープは、部分貼り式なので交換が必要な箇所だけ取り換えができます。



ケアスロープ標準価格表／規格表

タイプ	エッジの高さ	長さ×幅	重さ	標準小売価格+(税)	JANコード	TAISコード
CS-65	2.5cm	65cm × 70cm	約3kg	¥67,000+(税)	4958519500008	00093-000015
CS-100	2.5cm	100cm × 70cm	約5kg	¥83,000+(税)	4958519500015	00093-000016
CS-120	2.5cm	120cm × 70cm	約6kg	¥107,000+(税)	4958519500022	00093-000017
CS-150	2.5cm	150cm × 70cm	約8kg	¥118,000+(税)	4958519500039	00093-000018
CS-175	2.5cm	175cm × 70cm	約9kg	¥125,000+(税)	4958519500046	00093-000019
CS-200	2.5cm	200cm × 70cm	約10kg	¥136,000+(税)	4958519500053	00093-000020
CS-240C	2.5cm	240cm × 70cm	約12kg	¥230,000+(税)	4958519500060	00093-000021
CS-285C	3.5cm	285cm × 70cm	約15kg	¥290,000+(税)	4958519500077	00093-000038

☆材質:CS-65～CS-285C……繊維強化プラスチック・アルミ。☆上記サイズと重量は改良のため予告なしに変更することがあります。
 ☆折り畳み時の厚さ:CS-65～CS-120/8cm、CS-150～CS-240C/10cm、CS-285C/11cm。☆全タイプJIS認証、貸与マーク取得済。

車いす用可搬形スロープ


介護保険レンタル対象品

業界初!! 連結式長尺スロープ

ケアスロープ[®]J

最大耐荷重
300kg

- ◆ 分割できるため、軽ワンボックスカーで運搬ができます!
- ◆ 各パーツが軽量で女性でも持ち運びができます!
- ◆ 組み合わせにより80cmの段差も解消できます!
- ◆ CS-150 ~ CS-285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけます!

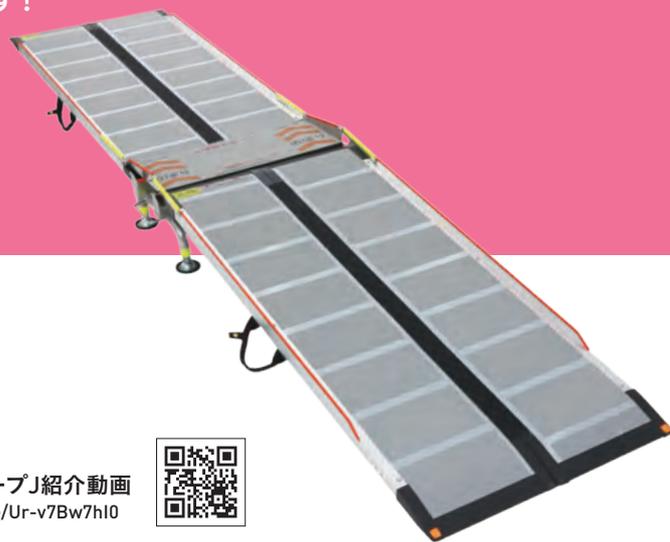

ケアスロープJの介護保険請求について

- ① ジョイント台単体でのTAISコードの登録はありません
- ② 必ずケアスロープ2台とジョイント台の3点セットで1つのTAISコードをご記入ください

詳細は次ページのケアスロープJ品番早見表をご参照ください

▶ ケアスロープJ紹介動画
<https://youtu.be/Ur-v7Bw7hI0>



ケアスロープ[®]Jとは

ケアスロープ2台、ジョイント台1台を組み合わせた車いす用の長尺スロープです。

下端側ケアスロープ



ジョイント台
(品番:CS-J)



上端側ケアスロープ



ケアスロープ[®]J



ケアスロープJとして
貸与マーク取得済み

☆CS-150 ~ CS-285Cを上端・下端どちらに組み合わせてもご利用いただけます。


ケアスロープ[®]J 専用 ジョイント台

ジョイント台にケアスロープをセットして、脱輪防止用のエッジアームをかけるだけの簡単設置!
特殊な工具は必要ありません。

ジョイント台規格表

商品名	品番	幅×長さ×高さ	重量	最大耐荷重	材質	JANコード	標準小売価格 +(税)
ジョイント台	CS-J	幅78cm × 長さ42.5cm × 下端側スロープ受け 高さ 21cm ~ 26cm	約12kg	300kg	ステンレス スチール アルミ	4958519520006 <small>※TAISコードの 登録は ありません</small>	¥75,000 +(税)

《ジョイント台 (CS-J) 各部名称》

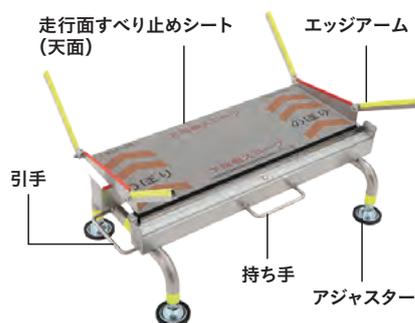

※ケアスロープ[®]Jをご使用の際には必ず介助者が付き添ってください。

「ケアスロープJ」品番早見表

📺 ケアスロープJ使い方動画
<https://youtu.be/Ur-v7Bw7h10>



使用スロープ

使用スロープ

	CS-150				
CS-150	CSJ-300 TAISコード 00093-000022	CS-175			
CS-175	CSJ-325 TAISコード 00093-000023	CSJ-350W TAISコード 00093-000044	CS-200		
CS-200	CSJ-350 TAISコード 00093-000024	CSJ-375 TAISコード 00093-000045	CSJ-400 TAISコード 00093-000048	CS-240C	
CS-240C	CSJ-390 TAISコード 00093-000025	CSJ-415 TAISコード 00093-000046	CSJ-440 TAISコード 00093-000049	CSJ-480 TAISコード 00093-000051	CS-285C
CS-285C	CSJ-435 TAISコード 00093-000043	CSJ-460 TAISコード 00093-000047	CSJ-485 TAISコード 00093-000050	CSJ-525 TAISコード 00093-000052	CSJ-570 TAISコード 00093-000053

**ケアスロープJの
介護保険請求について**

- ① ジョイント台単体でのTAISコードの登録はありません
- ② 必ずケアスロープ2台とジョイント台の3点セットで1つのTAISコードをご記入ください

*CS-150 ~ CS-285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。


*設置に必要な全長スペースは右記の長さが必要です。

上段スロープ長 + ジョイント台連結部の長さ13cm + 下段スロープ長 + 下段乗入れ時操作スペース

上端側設置スロープ段差目安表

上端側 CSタイプ	上端側適応段差目安表 (図①部分の段差目安)
CS-150	38cm(8°) ~ 53cm(12°)
CS-175	41cm(8°) ~ 58cm(12°)
CS-200	44cm(8°) ~ 63cm(12°)
CS-240C	50cm(8°) ~ 71cm(12°)
CS-285C	56cm(8°) ~ 81cm(12°)

『ケアスロープJ』設置例

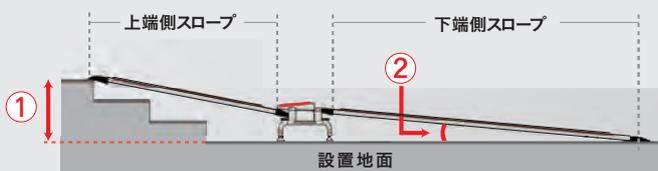


* ジョイント台と下端側スロープの設置地面がフラットである場合、下端側に設置するスロープの長さが長いほど、②の傾斜角度が緩やかになります。

【下端側適応段差目安】

CSタイプ…ジョイント台高さ(②の角度)

- CS-150 …… 21cm(8°) ~ 26cm(10°)
- CS-175 …… 21cm(7°) ~ 26cm(9°)
- CS-200 …… 21cm(6°) ~ 26cm(8°)
- CS-240C …… 21cm(5°) ~ 26cm(6°)
- CS-285C …… 21cm(4°) ~ 26cm(5°)

このようなケースでも使えます

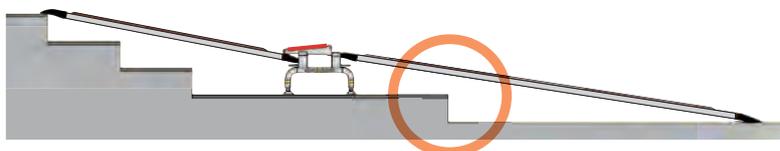

*階段の踊り場のような一段高い場所に設置することもできます。

下端側ケアスロープの設置

ジョイント台の高さは、下端側スロープの設置受け部分(水平器付き)を基準にしています。

ケアスロープ[®]J 設置例

ケアスロープJ(ジョイント台)を使用する事で、玄関ポーチにある多段差を解消できます！

Before



After



／ 様々な住宅環境に対応し、緩やかな傾斜を実現。介助者の負担軽減につながります！ ／



このような
問題を
解決します！

- ◆ 既存の可搬形スロープでは傾斜角度が急すぎる
- ◆ 昇降機が置けない
- ◆ 住宅改修ができない、したくない
- ◆ あがり框から外へ出る際、敷居によりスロープが掛けられない
- ◆ スロープの裏面に敷居があたってしまい安全に設置ができない

車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品

特許出願中



ケアスロープ®JC

最大耐荷重
300kg



スロープパーツB

▶ ケアスロープJC紹介動画
https://youtu.be/zTmjvE_g7pl



特長

- ◆ 掃き出し窓などからの出入りを可能にする横方向乗入れスロープです。
- ◆ 昇降機が設置できない環境や賃貸住宅での段差解消に有効です。
- ◆ 介護保険レンタル対象商品です。(貸与マーク取得済み)
- ◆ 左右どちらでも設置が可能です。
- ◆ 運搬・取扱いがしやすくコンパクトに収納できます。
- ◆ 適応段差は30cm ~ 50cmです。
- ◆ 設置取り回しも簡単! 工具は不要です。
- ◆ 適応スロープ(スロープパーツA)はCS-150 ~ CS-285Cの中からご利用いただけます。
- ◆ 日本製です。

スロープパーツA

※ ケアスロープ®CS-150・CS-175・CS-200・CS-240C・CS-285Cをご利用ください。これ以外のスロープでは介護保険レンタル対象となりません。

ケアスロープ®JC とは

スロープパーツA(ケアスロープ®)とスロープパーツB(CS-JC)を組合せた

車いす用横方向乗入れスロープ です。

スロープパーツA
(ケアスロープ®: CS-150 ~ CS-285C)



スロープパーツB
(CS-JC)



ケアスロープ®JC



※ケアスロープ®JCは一部仕様が変更になる場合があります。

※ケアスロープ®JCをご使用の際には必ず介助者が付き添ってください。

ケアスロープJC標準価格表／規格表

ケアスロープ[®]JC は、スロープパーツA及びBの組合せ製品となります。

品番	スロープパーツA	スロープパーツB	標準小売価格+(税)	TAISコード
CSJC-150	CS-150	CS-JC	¥318,000+(税)	00093-000054
CSJC-175	CS-175		¥325,000+(税)	00093-000055
CSJC-200	CS-200		¥336,000+(税)	00093-000056
CSJC-240	CS-240C		¥430,000+(税)	00093-000057
CSJC-285	CS-285C		¥490,000+(税)	00093-000058

品番	スロープパーツ	サイズ	重さ	材質	最大耐荷重	標準小売価格+(税)	JANコード
CS-JC ※スロープパーツBとしての単体型番	スロープパーツB ※スロープパーツBは各型番共通のご利用となり、必ずスロープパーツAとの組合せとなります	天板 幅約107cm 奥行約107cm	約6.4kg	樹脂複合板	300kg	¥200,000+(税)	4958519540004 ※スロープパーツBでのTAISコードの登録はありません。必ずスロープパーツA(ケアスロープ [®])と組合せての請求が必要です
		フレーム 幅約107cm 奥行約107cm 高さ(最低～最高) 54cm～74cm (落下防止柵含む)	約11.7kg (アジャスター、柵含む)	アルミスチール			
		フラップ 上端幅70cm 下端幅85cm 奥行57.5cm	約4.2kg	アルミ			

適応段差		
品番	高さ	傾斜角度
CSJC-150	30cm	12°
CSJC-175	30cm	10°
CSJC-200	35cm	10°
CSJC-240	40cm	10°
CSJC-285	50cm	10°

車いすの種類や介助する方の体力等により、適応範囲は変化します。
この表は目安としてください。

設置例

スロープをまっすぐに設置できない場所に最適です！



掃き出し窓や縁側から車いすの出入りができます！



左右方向問わず設置でき、ベランダやデッキにも使用できます！



車いす用可搬形スロープ

介護保険レンタル対象品


特許出願中

車いす用傾斜対応スロープ


勾配のある場所でもケアスロープ®を安定設置できます！

ケアスロープ®T


最大耐荷重
300kg

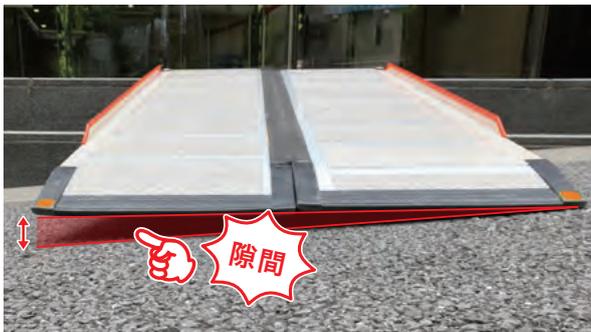


勾配のある場所にスロープを置くと
隙間が発生、設置が不安定...

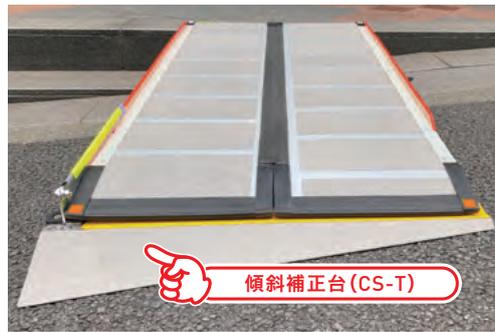

この隙間を補う事で
設置が安定します！

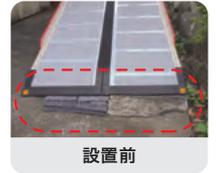

設置前

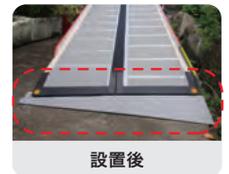

設置後

特長

- ◆ ケアスロープ®と地面の隙間に本製品を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの**簡単設置!**
- ◆ 高さ調整ができ、**4cm～6cm**まで対応可能です！
- ◆ 本製品は脱輪防止アームを付け替える事で**左右どちらでも設置可能です!**

ケアスロープ®T 標準価格表

品番	TAISコード	傾斜補正台	対応スロープ	標準小売価格 【CS-T+スロープ】 +(税)
CST-120	00093-000065	CS-T	CS-120	¥155,000+(税)
CST-150	00093-000059		CS-150	¥166,000+(税)
CST-175	00093-000060		CS-175	¥173,000+(税)
CST-200	00093-000061		CS-200	¥184,000+(税)
CST-240	00093-000062		CS-240C	¥278,000+(税)
CST-285	00093-000063		CS-285C	¥338,000+(税)

※ケアスロープ®Tをご使用の際には必ず介助者が付き添ってください。

ケアスロープ®Tとは

ケアスロープ®と傾斜補正台 (CS-T) を組み合わせた
車いす用傾斜対応スロープです。

ケアスロープ®
CS-120～CS-285C



+

傾斜補正台
(CS-T)



=


ケアスロープ®T



※ケアスロープ®Tは一部仕様変更になる場合があります。

傾斜補正台 (CS-T) 規格表

製品名	ケアスロープ®T専用傾斜補正台		
品番	CS-T	サイズ	奥行 約29cm～30cm × 幅 約75cm
標準小売価格+(税)	¥48,000+(税)	高さ調整範囲	4cm～6cm
JANコード	4958519550003	対応傾斜(勾配斜度)	3°～5°
重量	約3kg	材質	ステンレス・樹脂
耐荷重	300kg ※スロープにセットした状態	付属品	六角レンチ(4mm)

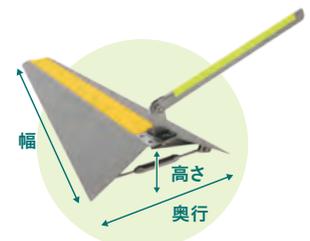

注) ケアスロープ®とセットでご使用ください。
CS-T単体でのTAISコードの登録はございません。

用途に合わせて選べるラインナップ

車いすシートカバーシリーズ



車いすシートカバー(2枚入り)



車いすの押し手レバーにひもを結ぶだけの簡単セット

標準小売価格 **¥4,300+**(税)

サイズ:40cm×90cm(全面防水)

カラー:グリーン・ピンク

素材:表面…アクリル/基布…ポリエステル/裏面…ポリウレタン

JANコード: グリーン 4958519321016


ピンク 4958519321023

1袋に
同色 2枚入り
1枚あたり
2,150円!

特長

- ◆ 車いすでの失禁や食べこぼしによる汚れを防止します。
- ◆ 手軽に洗濯でき、車いすシートへの臭い移りを防ぎます。
- ◆ 表面パイル地の起毛が臀部のスリップを防ぎ、座位を安定保持します。
- ◆ 裏面ポリウレタンフィルムがしっかり防水し、ズレも防止します。
- ◆ 速乾性に優れています。

使い捨て 車いすシートカバー

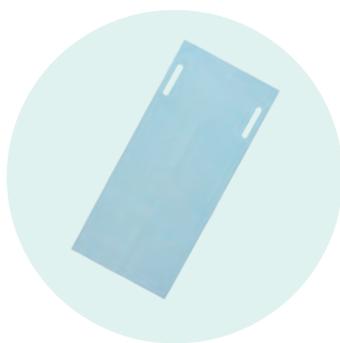

標準小売価格

¥31,000+(税)

サイズ:45cm×100cm

カラー:サックスブルー

素材:表面/裏面…レーヨン100%不織布/
ポリオレフィン系フィルム

入数:100枚(20枚×5袋/1ケース)

JANコード: 4958519321092

特長

- ◆ 車いす座面の不意な失禁や食べこぼしなどによる汚れを防止します。
- ◆ 防水タイプのため車いすの汚染対策に最適です。
- ◆ 使い捨てのため、手間なく処理することができます。
- ◆ 清掃作業の軽減につながります。
- ◆ 製品に取り付け用の穴を設けており、車いすのハンドルに引っ掛けるだけで設置が完了。
- ◆ シート裏面には滑り止め加工を施しており、車いすへの着座時にズレにくくしています。

ベッド・エアマット・ポータブルトイレなど
幅広い用途に対応できる商品ラインナップ

高機能防水シーツシリーズ

ケアカバー消臭防水マット

抗菌セラミックスが
素早く臭いを吸着します！



特長

- ◆ 抗菌セラミックス表面に微細な孔が開いており、ニオイ成分を閉じ込めます。
- ◆ 表面は吸水性に優れています。
- ◆ 100cm×80cmの大きなサイズで、ポータブルトイレまわりの汚れを防ぎます。
- ◆ くり返し洗濯でき、速乾性に優れています。

標準小売価格 **¥4,300+**(税)

サイズ: 80cm×100cm
カラー: ベージュ・サックス
素材: 表面…ポリエステル/裏面…ポリウレタン
JANコード: ベージュ 4958519321061
サックス 4958519321054

ケアカバーエアマット防水シーツ

特長

- ◆ 100cm×200cmの大きなサイズでエアマットや寝具をカバーすることができます。
- ◆ 四隅のゴムバンドにより、シーツ交換が簡単です。
- ◆ 表面は吸水性良く、天然抗菌剤「キトサン」を配合していますので、不快な臭いを防ぎます。
- ◆ 頭部白布部は撥水・防汚加工をしており、汚れを防ぎます。
- ◆ くり返し洗濯でき、速乾性に優れています。



四隅に
ゴムバンド
付き

標準小売価格 **¥5,800+**(税)

サイズ: 100cm×200cm
カラー: グリーン・ピンク
素材: 表面…アクリル/基布…ポリエステル/
白布部…ポリエステル/裏面…ポリウレタン
JANコード: グリーン 4958519321078
ピンク 4958519321085



SEKマーク(青): 抗菌防臭加工の試験をクリアした製品に付与される
一般社団法人繊維評価技術協議会認証のマークです。



新多機能パイルシート




大きなサイズで、縦・横自由にセットできます

特長

- ◆ 吸水性抜群で抱水能力1.9リットルの大容量です。
- ◆ 繰り返し洗濯可能で、ソフトな風合いを維持します。
- ◆ 特殊編みにより、糸のほつれがなく丈夫です。
- ◆ 100cm×160cmの全面防水。

表面はパイル地で肌触りが良く、汗や尿を吸収し、洗濯後の速乾性に優れています。新たに天然抗菌剤「キトサン」を配合したことで不快な臭いを防ぐだけでなく、肌への刺激を抑えた人にやさしい防水シートです。

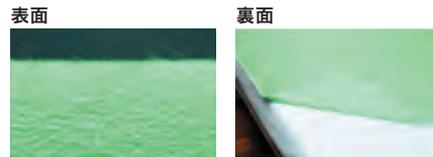

標準小売価格 **¥4,300+**(税)

サイズ:100cm×160cm(全面防水)
 カラー:グリーン・ピンク
 素材:表面…アクリル/基布…ポリエステル/裏面…ポリウレタン
 JANコード: グリーン 4958519321030
 ピンク 4958519321047

繊維1本1本の表面に、多数の溝があり繊維の表面積を広げ、水分の吸収・拡散・放出する高機能繊維を使用しています。



繊維断面拡大写真

自然が生んだキトサン練り込み
ニューターフェルト
 抗菌防臭アクリルせんい

キトサンとは

- カニやエビの甲羅に多く含まれる天然多糖類です。
- 数々の菌に対して抗菌効果が認められています。
- 健康向上効果、有害重金属吸着作用の研究も進んでいます。
- 植物の成長促進、土壌改良に役立つとの報告があります。

高い 抗菌防臭効果

「キトサン」を原料製造段階から、特殊な方法で練り込み繊維一本一本の中心部まで練り込んでいますので、繊維上に発生する菌類の増殖を抑えその分泌液から発生する不快な臭いを抑制し、さわやかな生活を創ります。

すぐれた 耐久性

染色加工は標準です。一般的な染色加工では、抗菌防臭性能の低下もほとんどありません。洗濯に強いのも特徴です。洗っても汚れても、そのすぐれた抗菌防臭性能を保持します。

安全に使える 安全性

「キトサン」は生体適合性、抗菌防臭、血圧上昇抑制作用、コレステロール低下作用などが認められ、健康食品としても注目されていますが安全性にすぐれています。

確かな 機能

ニューターフェルトグリーン(キトサン練り込み)はSEK(繊維製品試験研究所)の抗菌防臭性能試験をクリアしています。

キトサン




簡単・安全・快適に看護師・介助者の腰痛を予防します

移乗補助具 ライトスライド

ライトスライドは、各種医療・介護施設でベッド・ストレッチャー・手術台・検査台などでの患者移動にお使い頂く移乗補助具(スライディングボード)です。

簡単な作業でスムーズに移乗できますので、看護師・介助者の作業負担を大幅に軽減します！
安心の国内生産モデルです。

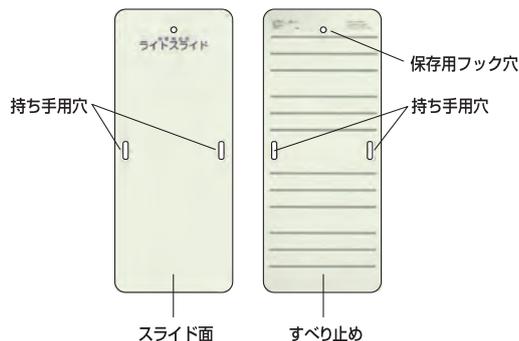

使用例

- ストレッチャー・入浴用ストレッチャー ↔ ベッド
- ストレッチャー ↔ 手術台・診察台
- ストレッチャー ↔ 各種検査台
- フルリクライニング車いす ↔ ベッド

構造と機能

- ポリカーボネイトとABS樹脂との複合材で丈夫で弾力性があり、10cm程度までの段差移動も可能です。
- 独自の2面構造で安定した移乗が可能です。
 - ・表面:円滑なスライド機能
 - ・裏面:すべり止め機能
- 両サイドに持ち運びに便利な持ち手用穴、上端部に収納に便利な保管用フック穴を設けております。
- 耐荷重は140kgです。

※洗浄消毒は中性洗剤と消毒用アルコール以外使用しないでください。
※X線、MRI、CT等の検査装置上では使用できません。

使用方法 ストレッチャー ↔ ベッドの場合



1 押し手側がシーツを持ち上げてください。受け手側はライトスライドを患者の下に挿入してください。

2 受け手側はシーツを引っ張り、押し手側は患者を押してライトスライドの上をスライドさせてください。

3 移動完了後、持ち手用穴を握りライトスライドを抜き取ってください。

仕様・価格表

品名	品番	サイズ(幅×長さ)	厚み	重量	標準小売価格+(税)	JANコード	TAISコード
ライトスライドLサイズ	LS-L	63.5cm×152.5cm	0.4cm	4.9kg	¥40,000+(税)	4958519700002	00093-000039
ライトスライドMサイズ	LS-M	56cm×152.5cm		4.3kg	¥39,000+(税)	4958519700019	00093-000040
ライトスライドSサイズ	LS-S	48cm×140cm		3.4kg	¥38,000+(税)	4958519700026	00093-000041
ライトスライドハーフサイズ	LS-H	63.5cm×75cm		2.4kg	¥22,000+(税)	4958519700033	00093-000042

※カラーは全タイプアイボリーになります。



ケアメディックス株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島 3-23-1 SKビル 2階

TEL.03-3837-0551 FAX.03-3837-0554



[WEBはコチラ]

<http://www.caremed.co.jp/>

※製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

※カラー印刷インクや撮影条件などから
実際の色と多少異なる場合があります。



大栄株式会社

大栄's
葬儀ビジネス
サポート



DAIEI's FUNERAL BUSINESS SUPPORT