

日本製 ポリカーボネイト / ABS 樹脂製

介護保険レンタル対象品




簡単・安全・快適に看護者・介助者の腰痛を予防します

移乗補助具 ライトスライド

ライトスライドは、各種医療・介護施設でベッド・ストレッチャー・手術台・検査台などの間での患者移動にお使い頂く移乗補助具(スライディングボード)です。

簡単な作業でスムーズに移乗できますので、看護者・介助者の作業負担を大幅に軽減します！安心の国内生産モデルです。

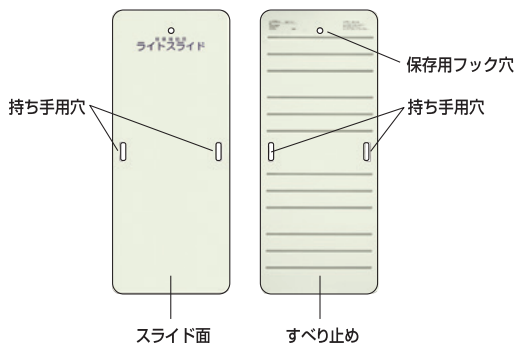

使用例

- ストレッチャー・入浴用ストレッチャー ↔ ベッド
- ストレッチャー ↔ 手術台・診察台
- ストレッチャー ↔ 各種検査台
- フルリクライニング車いす ↔ ベッド

構造と機能

- ポリカーボネイトとABS樹脂との複合材で丈夫で弾力性があり、10cm程度までの段差移動も可能です。
- 独自の2面構造で安定した移乗が可能です。
 - ・表面：円滑なスライド機能
 - ・裏面：すべり止め機能
- 両サイドに持ち運びに便利な持ち手用穴、上端部に収納に便利な保管用フック穴を設けております。
- 耐荷重は140kgです。

※洗浄消毒は中性洗剤と消毒用アルコール以外使用しないでください。
※X線、MRI、CT等の検査装置上では使用できません。

使用方法 ストレッチャー ↔ ベッドの場合



1 押し手側がシーツを持ち上げてください。受け手側はライトスライドを患者の下に挿入してください。

2 受け手側はシーツを引っ張り、押し手側は患者を押してライトスライドの上をスライドさせてください。

3 移動完了後、持ち手用穴を握りライトスライドを抜き取ってください。

仕様・価格表

品名	品番	サイズ(幅×長さ)	厚み	重量	標準小売価格
ライトスライドLサイズ	LS-L	63.5cm×152.5cm	0.4cm	4.9kg	40,000円+(税)
ライトスライドMサイズ	LS-M	56cm×152.5cm		4.3kg	39,000円+(税)
ライトスライドSサイズ	LS-S	48cm×140cm		3.4kg	38,000円+(税)
ライトスライドハーフサイズ	LS-H	63.5cm×75cm		2.4kg	22,000円+(税)

カラーは全タイプアイボリーになります。

お問い合わせ



大栄株式会社