

外部からのウイルス・細菌を 足元からシャットアウト。

いつでも殺菌済みのスリッパを
患者様にご利用いただけます。

スリッパ殺菌ディスペンサー SSDXは、
医療機器として認められている「本格派のスリッパ殺菌装置」です。
スリッパが収容されている間、紫外線殺菌灯で
スリッパの内側・裏側を均一に殺菌するため、
外部からの細菌・ウイルスの持ち込みを防ぎます。



ウイルス・細菌をシャットアウト

紫外線を3方向から照射し殺菌。ウイルス・細菌を入口でシャットアウトして、常に清潔な状態のスリッパを提供院内を清潔に保ちます。

- すべての面に紫外線が照射されます。
- 前あきスリッパなので、つま先部分もしっかり殺菌できます。



真俯図(イメージ)

ディスペンサー方式を採用

ボタンを押すと殺菌された順番に下からスリッパが出てきます。

コンパクト設計

省スペースの為、玄関がスッキリし、清潔感をアピール出来ます。

専用防臭スリッパ

スリッパは、光触媒加工の専用防臭仕様。カラーは全4色からお選びいただけます。また、名入れにも対応しています(オプション)。



ブルーグレー ミントグリーン ワインレッド ココアブラウン

※本体ご購入時に専用スリッパが10足付属しております。



SSDX
(ブルー)

SSDX-V
(ベージュ)

コンパクトなデザインで、わずかなスペースでも設置可能。 スッキリとした清潔感のある印象を与えます。



殺菌効果 社団法人北里研究所 医療環境科学センターの分析結果より

菌種	紫外線照射時間	
	90%殺菌率時	99.99%殺菌率時
ブドウ球菌	10秒	40秒
大腸菌	10秒	40秒
緑膿菌	55秒	3分
真菌	20分	30分
水虫菌	20分	30分

※すべての菌、ウイルスの対して効果があるわけではありません。

使用方法 ※スリッパを正しく返却しないと詰まりの原因となりますのでご注意ください。

① 本体上部に置く

使用済みのスリッパを本体上部の返却口に置くと返却口が開き、専用スリッパがボックス内に収納されます。




② スリッパを殺菌

紫外線がスリッパの裏側、内側とも均一に殺菌します。
※ボックス内に収納されている間、常に殺菌します。




③ 殺菌されたスリッパを履く

ボタンを押すと、ボックスの下から一足ずつスリッパが出てきます。

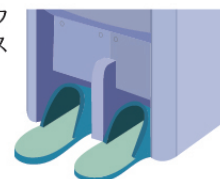

仕様

名称	スリッパ殺菌ディスペンサー
型式	SSDX(-V)
電源電圧	AC100V
周波数	50/60Hz(スイッチによる切替式)
消費電力	60VA
外形寸法	幅341×奥行445×高さ1,207mm
重量	31kg
紫外線照射量	100μW/cm以上
スリッパ収納数	10足
使用環境条件	10~40℃
付属品	専用スリッパ(10足)、専用マット、付属シール、専用クリーナーセット

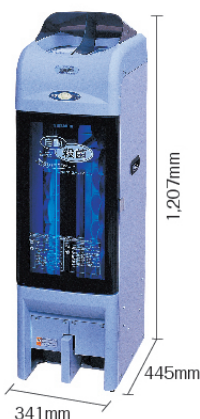

追加専用スリッパ(10足単位)

本体付属スリッパ10足とは別にスリッパのみのご注文ができます。



ブルーグレー ミントグリーン ワインレッド ココアブラウン

定期交換部品

紫外線ランプは効果に寿命があるため、定期交換が必要です。約1年での交換をお薦めします。

品名	紫外線ランプ・グローランプセット ・紫外線ランプ15W …1本 ・紫外線ランプ 6W …2本 ・グローランプ15W …1本 ・グローランプ 6W …2本
交換目安	3,000時間

名入れます(有料サービス)

1列10文字の2列で最大20文字まで印刷が可能です。

※当サービスは有料サービスとなります。

※名入れ後の返品はお受けできませんので、ご注文時に名入れの文字のご指示・ご確認は入念をお願いいたします。

※納品後の名入れはお受けできません。



発注単位	10足
字体	丸ゴシック
文字色	白
印刷可能スペース	1段組:10×80mm/2段組:25×80ミリ

安全に関する注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。 ※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

製造販売元 **株式会社IH物流産業システム**

環境ソリューションBU 営業グループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL.086-944-6528 FAX.086-942-9030

<https://iat.i9.bcart.jp/page/top>

(QRコードよりアクセスしてください)



取り扱い・お問い合わせ



大栄株式会社